

Vizieră de protecție



Tutorial asamblare video

Material: APET
Greutate: 62g
Grosime material: 0.5mm




Descarcă pdf

Acest produs este realizat pe bază de donații și voluntariat și este distribuit gratuit cadrelor medicale și personalului auxiliar în contextul luptei cu noul Coronavirus.

**Acest produs nu este omologat
și nu este ambalat în condiții sterile.**

Este necesară dezinfectarea înainte de prima utilizare.


Elemente componente

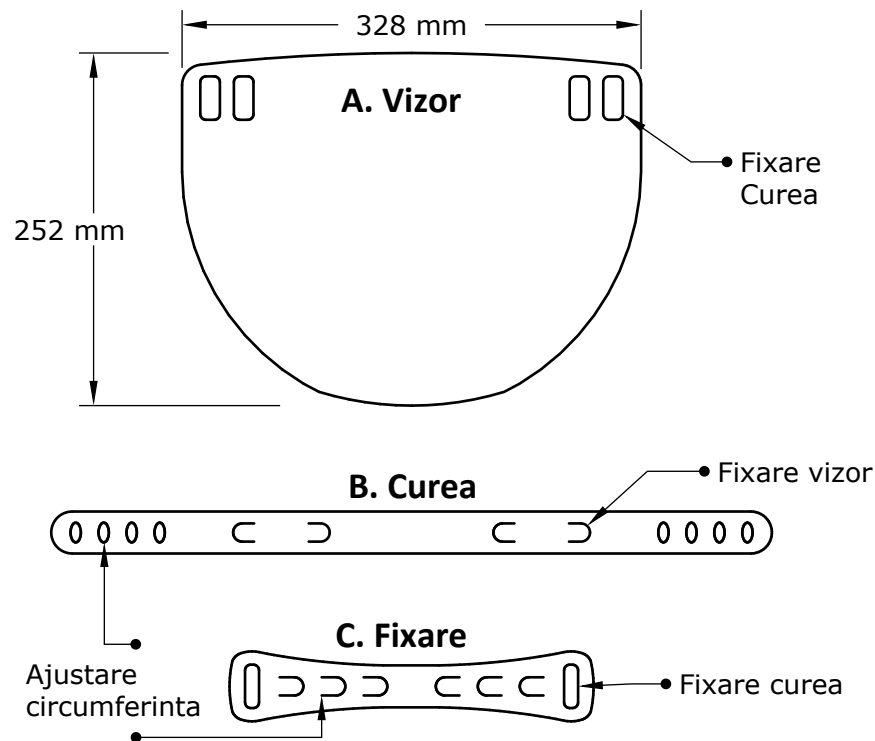

Instrucțiuni de asamblare

1

Eliminați materialul din găurile de fixare ale pieselor.

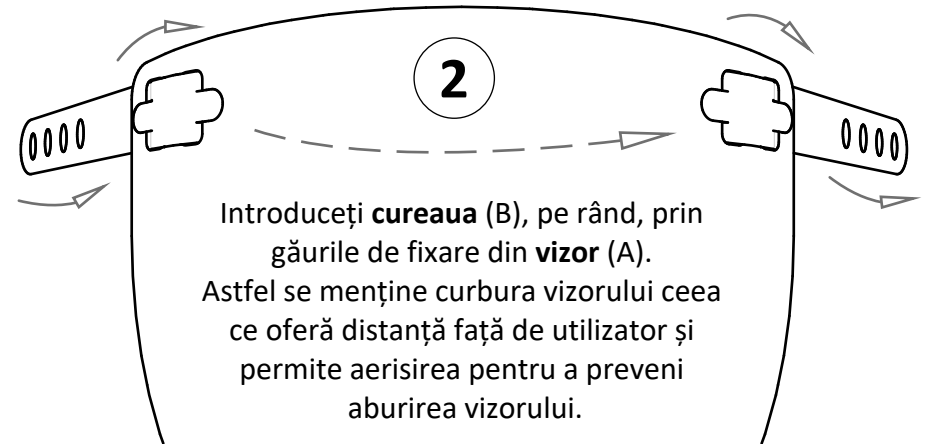

4

Repetăți procedura și pentru partea cealaltă

3

Introduceți capetele **curelei** (B) prin găurile din capatul **elementului de fixare** (C) și securizați-o folosind agățătorile.

5

Puneți viziera pe cap și, dacă este nevoie, reglați strângerea. (Pentru aceasta este nevoie să o dați jos)

